

NANNIC

Upptäck din bästa hud någonsin.



TRÄNINGSPÄRM

UTBILDNING MODUL 1

Utbildning: Radiofrekvensutrustning NBE 3000 inom
skönhetsbranschen



MÅLET MED UTBILDNINGEN

Kursen för radiofrekvensutrustning NBE 3000 (Nannic Beautifying Energy) inom kosmetikbranschen är utformad för att ge hudspecialister nödvändig kunskap och färdigheter för att effektivt och säkert använda radiofrekvensteknologi i sin praktik. Denna kurs gör det möjligt för yrkesverksamma att utöka sitt behandlingsutbud och erbjuda sina kunder avancerade behandlingar för hudfryngring och förbättring.

Varning

NBE 3000 är inte ett medicinskt instrument och är inte avsett för diagnos, undersökningar, uppföljning eller behandling av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar. Vid tveksamhet, konsultera alltid en läkare.

Säkerhetsstandarder

- Läs noggrant igenom manualen innan du använder enheten.
- Var medveten om alla kontraindikationer. Dessa finns under avsnittet "Kontraindikationer".
- NBE 3000 uppfyller alla säkerhetsstandarder som gällde vid tillverkningstillfället.
- NBE 3000 måste vara ansluten direkt till ett jordat eluttag. Dela inte eluttaget med annan utrustning. Denna åtgärd förbättrar ström kvaliteten.
- Inga metallföremål får finnas mellan den passiva plattan och den aktiva plattan.
- För att säkerställa optimal hygien, rengör NBE 3000 med den rekommenderade rengöringsprodukten för utrustningen.

KURSINNEHÅLL

1. Introduktion till Radiofrekvensteknik

- Definition och grundläggande principer för radiofrekvens (RF)
- Drift av RF-utrustningen NBE 3000
- Fördelar och tillämpningar av RF inom skönhetsindustrin
- Hudens anatomi och fysiologi
- Översikt över hudens lager
- Hudens åldrande och de faktorer som påverkar den
- Hudens reaktion på radiofrekvensbehandlingar

2. Kontraindikationer och hygien

- Kontraindikationer
- Hygien
- Varningar

3. NBE 3000

- Användning av enheten

4. Produktinformation

5. Exempel på en kundjournal

KURSENS LÄNGD

Kursen för NBE 3000 Radiofrekvensutrustning är indelad i teoretisk undervisning, praktisk träning och en träningspärm.

CERTIFIERING

Efter avslutad kurs kommer deltagarna att erhålla ett intyg om deltagande i NBE 3000-utbildningen.

NANNIC

Upptäck din bästa hud någonsin.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INTRODUKTION TILL RADIOFREKVENSTEKNIK	5
2. HUDENS ANATOMI OCH FYSIOLOGI	8
3. KONTRAINDIKATIONER OCH HYGIEN	11
4. NBE 3000	13
5. PRODUKTINFORMATION	18
6. EXEMPEL PÅ EN KUNDJOURNAL	30

1. INTRODUKTION TILL RADIOFREKVENSTEKNIK

Radiofrekvens (RF) avser elektromagnetiska vågor med en frekvens inom radiovågsområdet i det elektromagnetiska spektrumet. Dessa vågor har vanligtvis en frekvens som sträcker sig från några kilohertz (kHz) till några gigahertz (GHz). RF-teknologi används inom olika områden, inklusive kommunikation, medicinska behandlingar och industriella applikationer, men även inom skönhetsindustrin för hudföryngring och kroppsvård.

De grundläggande principerna för radiofrekvens inom estetiska applikationer bygger på RF-vågornas förmåga att penetrera huden och generera värme i de djupare hudlagren. Detta möjliggörs genom interaktionen mellan den elektromagnetiska spänning som genereras av NBE-utrustningen och hudens vävnader.

Viktiga principer inkluderar:

1. PENETRATIONSdjUP

Penetrationsdjupet för RF-vågor i huden beror på olika faktorer, inklusive vågfrekvensen, egenskaperna hos hudvävnaden, den använda metoden och elektrodplaceringen.

2. TERMISKA EFFEKTER

RF-energi omvandlas till värme när den passerar genom hudens vävnader. Denna termiska energi bidrar till en kontrollerad temperaturökning i de behandlade områdena, vilket kan leda till en rad biologiska reaktioner, såsom stimulering av kollagenproduktionen och förbättrad blodcirkulation.

3. MÅLINRIKTAD DIATERMAL EFFEKT

En av fördelarna med kapacitiv RF-teknologi är dess förmåga att målinrikta och selektivt värma upp vissa målområden i huden. Detta möjliggör en riktad behandling, såsom minskning av rynkor, huduppstramning och cellulitreduktion.

4. SÄKERHET

RF-behandlingar är säkra och icke-invasiva. Eftersom den kapacitiva RF-energin inte skadar hudens ytskikt, krävs ingen återhämtningstid efter en behandling. Dock finns det, som med alla estetiska behandlingar, kontraindikationer som bör diskuteras innan behandlingen påbörjas. Genom att förstå dessa grundläggande principer kan skönhets terapeuter effektivt och säkert använda den kapacitiva radiofrekvensteknologin med NBE-enheten och erbjuda sina kunder ett brett utbud av hudföryngrings- och kroppsbehandlingar.

Användning av NBE 3000 RF-utrustning

1. RF-TEKNOLOGI

NBE 3000 använder kapacitiv RF-teknologi, som genererar elektromagnetiska vågor med en specifik frekvens och energi. Dessa RF-vågor levereras till huden med syftet att värma upp specifika vävnader och skapa termiska effekter.

2. MONOPOLÄRT RF-SYSTEM

Processen involverar ett monopolärt, isolerat aktivt handstycke eller platta och en inaktiv platta. Ett bipolärt handstycke kan också anslutas till NBE 3000.

3. DJUPVERKAN

RF-energin tränger igenom hudens ytliga lager och når de djupare vävnaderna, såsom kollagenrika dermala bindvävnader. På grund av RF-vågornas specifika frekvens och energi kan NBE 3000 selektivt och effektivt värma upp önskade målområden.

4. TERMISKA EFFEKTER

När RF-energin absorberas av vävnaderna skapar den en kontrollerad temperaturökning i målområdena. Dessa termiska effekter kan utlösa olika biologiska reaktioner, såsom stimulering av kollagenproduktionen, förbättrad blodcirkulation och uppstramning av huden.

5. SÄKERHET OCH KOMFORT

NBE 3000 är utformad med kundens säkerhet och komfort i åtanke. Apparaturen är utrustad med en nödstoppsknapp som klienten kan hålla i om du skulle behöva lämna rummet. Med denna knapp kan klienten stänga av utrustningen om den börjar kännas för varm. Behandlingarna upplevs generellt som mycket bekväma av kunderna.

6. BEHANDLINGSMÖJLIGHETER

NBE 3000 kan användas för hudförbättring genom olika estetiska behandlingar, inklusive huduppstramning, rynkereducering, cellulitreducering och kroppskonturering. Tack vare mångsidigheten hos RF-teknologin kan skönhets terapeuter erbjuda sina kunder ett brett utbud av behandlingar.

Kort sagt använder NBE 3000 RF-Apparaturen avancerad kapacitiv RF-teknologi för att möjliggöra effektiva och säkra behandlingar för hudförnyelse och förbättring.

Fördelar och tillämpningar av RF NBE 3000 inom skönhetsindustrin

Kapacitiv radiofrekvens (RF) har flera fördelar och tillämpningar inom skönhetsindustrin tack vare dess förmåga att leverera termisk energi till de djupare hudlagren. Här är några nyckelfördelar och tillämpningar av RF inom skönhetsindustrin:

1. HUDUPPSTRAMNING OCH FÖRYNGRING

Kapacitiv RF-energi stimulerar kollagenproduktionen och förbättrar hudens elasticitet, vilket resulterar i märkbar uppstramning och föryngring av huden. Detta kan hjälpa till att reducera fina linjer, rynkor och slapp hud, vilket främjar ett ungdomligare utseende.

2. UPPSTRAMNING AV KROPPEN

Kapacitiv RF-teknologi kan appliceras på olika delar av kroppen för att strama upp huden och förbättra konturerna. Detta är särskilt användbart för områden som magen, låren, armarna och skinkorna, där överflödigt hud kan uppstå på grund av viktnedgång, graviditet eller åldrande.

3. CELLULITREDUCERING OCH FETTMINSKNING

Kapacitiva RF-behandlingar kan hjälpa till att minska synligheten av celluliter genom att värma upp fettcellerna och strama upp kollagenfibrerna. Detta kan resultera i en jämnare hudtextur och en minskning av de gropar och ojämnheter som är karakteristiska för celluliter.

4. FÖRBÄTTRAD BLODCIRKULATION

De termiska effekterna av kapacitiv RF-energi kan förbättra blodcirkulationen i de behandlade områdena, vilket kan bidra till en friskare och mer strålande hy. En förbättrad syretillförsel och avlägsnande av koldioxid genom blodet kan också främja hudens allmänna hälsa.

5. ICKE-INVASIV OCH UTAN ÅTERHÄMTNINGSTID

Kapacitiva RF-behandlingar med NBE 3000 är icke-invasiva, vilket innebär att inga snitt eller injektioner behövs. Det innebär att du kan gå på fest efter behandlingen.

6. SÄKERHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ALLA HUDTYPER

Kapacitiv RF-teknologi är säker och lämplig för alla hudtyper och hudtoner. Eftersom den inte skadar hudens ytskikt finns det färre risker för biverkningar eller komplikationer jämfört med mer invasiva ingrepp.

Sammanfattningsvis erbjuder NBE 3000 en effektiv och mångsidig lösning för en rad olika estetiska behov, vilket gör det möjligt för kunder att njuta av förbättrad hudföryngring och kroppskonturering utan behov av kirurgiska ingrepp.

2. HUDENS ANATOMI OCH FYSIOLOGI

Översikt över hudens lager

1. EPIDERMIS:

- Det yttre hudlagret.
- Består huvudsakligen av epitelceller.
- Inkluderar olika sublager såsom stratum corneum, stratum granulosum, stratum spinosum och stratum basale.

2. DERMIS:

- Belägen under epidermis.
- Består huvudsakligen av bindväv.
- Innehåller nerver, blodkärl, hårsäckar och talgkörtlar.

3. HYPODERMIS (SUBKUTIS):

- Det djupaste lagret av huden.
- Består främst av fettvävnad och bindväv.
- Fungerar som isolering och energireserv.

Hudens åldrande och de faktorer som påverkar det:

Hudens åldrande är en komplex process som påverkas av olika interna och externa faktorer:

1. INRE (INTRINSISKA) FAKTORER

- **Genetik:** Ärftlig benägenhet spelar en viktig roll i hur snabbt huden åldras.
- **Hormonella förändringar:** Hormoner som östrogen och testosteron påverkar huden..
- **Kronologisk ålder:** Den naturliga åldringsprocessen som sker med tiden.

2. YTTRE (EXTRINSISKA) FAKTORER

- **Exponering för UV-strålning:** Solskador är en av de främsta orsakerna till för tidigt åldrande av huden.
- **Rökning:** Rökning påskyndar hudens åldringsprocess genom att skada kollagen och elastin.
- **Luftföroreningar:** Skadliga ämnen i luften kan skada huden och påskynda åldrandet.
- **Näring och livsstil:** En obalanserad kost och dåliga vanor som alkoholmissbruk kan bidra till hudens åldrande.

Fördelar och tillämpningar av RF NBE 3000 inom skönhetsindustrin

Kapacitiv radiofrekvens (RF) för huduppstramning verkar genom att generera kontrollerad värme i de djupare hudlagren. Denna värme stimulerar kollagenproduktionen och förbättrar blodcirkulationen, vilket resulterar i att huden stramas upp och blir fastare. Olika hudlager och celler spelar en stor roll i denna process:

1. DERMIS

Dermis är det andra hudlagret, precis under epidermis. Radiofrekvensen tränger in i dermis och värmer upp kollagen- och elastinfibrerna. Denna värme stimulerar kollagenfibrerna att dra ihop sig och föröka sig, vilket resulterar i en omedelbar uppstramning av huden.

2. KOLLAGEN

Kollagen är ett strukturellt protein som ger huden dess fasthet och elasticitet. När kollagenet värms upp med kapacitiv NBE-radiofrekvens, triggas en process som kallas neokollagenes. Fibroblasterna stimuleras att producera nytt kollagen, elastin och proteoglykaner, vilket i slutändan leder till långvarig huduppstramning.

3. ELASTIN

Elastin är ett annat protein i huden som bidrar till dess elasticitet. Värmen från radiofrekvensen kan också stimulera elastinfibrer, vilket gör dem mer elastiska och stramar upp huden.

4. FIBROBLASTER

Fibroblaster är celler i dermis som ansvarar för produktionen av kollagen och elastin. Värmen från radiofrekvensen stimulerar fibroblasternas aktivitet, vilket får dem att producera mer kollagen och elastin, vilket förbättrar hudens fasthet och elasticitet. Alla dessa processer bidrar till en uppstramning av huden och en minskning av rynkor och slapphet, vilket resulterar i en mer ungdomlig hud.

Hudens respons på radiofrekvensbehandlingar

Kapacitiva radiofrekvensbehandlingar med NBE 3000 blir alltmer populära inom den estetiska branschen för huduppstramning och minskning av rynkor. Behandlingarna resulterar i:

1. STIMULERING AV KOLLAGENPRODUKTION

RF värmer de djupare hudlagren, vilket leder till stimulering av fibroblaster, cellerna som är ansvariga för produktionen av kollagen och elastin. Detta resulterar i förbättrad hudelasticitet och fasthet.

2. UPPSTRAMNING AV HUDEN

Genom att stimulera kollagen och elastin uppstår en uppstramningseffekt som minskar fina linjer och rynkor samt förbättrar hudens övergripande struktur.

3. FÖRBÄTTRAD BLODCIRKULATION

RF-behandlingar förbättrar blodcirkulationen i huden, vilket kan leda till en friskare hudton och förbättrad hudkondition.

Det är dock viktigt att notera att resultaten kan variera beroende på individens hudtillstånd och livsstilsvanor.

3. KONTRAINDIKATIONER OCH HYGIEN

- Kontraindikationer
- Hygien
- Varningar

Kontraindikation vid användning av NBE 3000

1. GRAVIDITET

RF-behandlingar rekommenderas generellt inte under graviditet på grund av bristen på forskning om effekterna på fostret. Det är viktigt att alltid fråga kunden om en graviditet innan någon RF-behandling utför.

2. METALLIMPLANTAT

Personer med metallimplantat, såsom pacemakers, metallplattor eller skruvar i behandlingsområdet, anses inte vara lämpliga för RF-behandlingar på grund av risken för interaktion med metallen och eventuell skada på implantaten.

3. AKTIVA HUDSJUKDOMAR

Människor med aktiva hudsjukdomar som eksem, psoriasis, svår acne eller hudinfektioner i behandlingsområdet bör vara försiktiga med RF-behandlingar, eftersom dessa kan förvärra tillstånden eller orsaka komplikationer.

4. NYLIGEN GENOMFÖRDA KIRURGISKA INGREPP

Patienter som nyligen genomgått kirurgiska ingrepp i behandlingsområdet bör vänta tills såret är helt läkt innan de genomgår RF-behandling för att undvika komplikationer.

5. YTTERLIGARE RÅD

Med NBE 3000 kan du behandla friska personer. Vid medicinering eller avvikelser rekommenderas att söka råd från en läkare. Vid användning av botox och/eller fillers är det tillrådligt att vänta minst 2 veckor innan NBE 3000-behandling.

NANNIC

Upptäck din bästa hud någonsin.

Hygien

Rengör alltid NBE 3000 med Nannic Tool cleanser. Detta säkerställer att din enhet inte gulnar eller torkar ut. Plastskydden som placeras över handstyckena ska vara torra och rena. Rengör skydden med en mild tvål, skölj noggrant och låt dem lufttorka ordentligt.

Varningar

Använd endast NBE 3000 med Nannics rekommenderade serum. Andra produkter kan orsaka problem på och i huden, såsom allergiska reaktioner eller brännskador. Tillverkaren av denna enhet kan under inga omständigheter hållas ansvarig för konsekvenserna av användningen av andra produkter eller för felaktig användning av enheten.

NANNIC

Upptäck din bästa hud någonsin.

4. NBE 3000



STEG 1

Ha alla produkter och material redo

- INFO: Bär helst behandlingskläder från Nannic.

STEG 2

Placera 2 inaktiva plattor på nivån av skulderbladen

- INFO: Plattan på vänster sida med vänster prob.

STEG 3

Fäst de två proberna

- INFO: Plattan på vänster sida med vänster prob.

STEG 4

Ta bort ögonmakeupen

- PRODUKT: Eye Make-up Remover.
- INFO: Använd bomullsrandeller.
- DETALJER: Kokosolja innehåller kokosalkaner och kaprylsyra vilket ger en silkeslen känsla.

NANNIC

Upptäck din bästa hud någonsin.

STEG 5

Ta bort smink från huden

- **PRODUKT:** Make-up Remover.
- **INFO:** Applicera på torr hud med händerna och tillsätt sedan vatten och massera ytterligare. Torka av med en varm, fuktig handduk.
- **DETALJER:** Sheasmör och rapsolja med mjuk, mjölkliknande textur.

STEG 6

Rengör huden

- **PRODUKT:** Pore Care Cleanser.
- **INFO:** Applicera på torr hud med händerna och tillsätt sedan vatten och massera ytterligare. Torka av med en varm, fuktig handduk.
- **DETALJER:** Smektisk lera som absorberande ämne och inulin och fruktos från cikoria återställer mikrobiomet.

STEG 7

Applicera peeling

- **PRODUKT:** White willow bark peeling.
- **INFO:** Applicera med händerna, låt verka i 10 minuter, torka av med en varm handduk.
- **DETALJER:** Salix alba-extrakt är en naturlig salicylsyra, aloe vera är antibakteriell, kamomill är antiinflammatorisk, jojobaolja är en antioxidant.

STEG 8

Stäng porerna

- **PRODUKT:** Pore treat lotion.
- **INFO:** Använd bomullsrandeller.
- **DETALJER:** Hamamelis-extrakt är antiinflammatorisk, vitamin B5 återfuktar, allantoin stimulerar nybildning av celler.

STEG 9

Applicera de speciellt utvalda serum på ansiktet

- **PRODUKT:** Nannic-serum.
- **INFO:** Applicera med händerna, minst 6 till 10 pump.

STEG 10

Applicera 8 droppar av aktiveringsserumet

- **PRODUKT:** Probiotic activator.
- **INFO:** Applicera dropparna och massera in.
- **DETAILS:** Bifidus-bakterie.

NANNIC

Upptäck din bästa hud någonsin.

STEG 11

Slå på NBE3000 för problemen

- INTENSITET: Börja på 40%, öka eller minska beroende på kundens behov.

STEG 12

Utför Nannic Beautifying Massage

- INFO: Se dokument.

STEG 13

Stäng av enheten efter NBE-massagen

- INFO: Stäng av stegvis och sedan helt (handstyckena i hållaren).

STEG 14

Applicera algmasken med en spatel

- PRODUKT: Moisturizing or Purifying Algae Mask.
- INFO: Skydda bandån med kleenex, låt verka i 10 minuter medan du fortsätter med steg 15.

STEG 15

Massera axlarna och nedre delen av nacken

- PRODUKT: Bio-Energy Heptapeptide Massage Cream.
- INFO: Massera axlarna och nedre delen av nacken.
- DETALJER: Opuntia indica-extrakt: intensiv återfuktning, arnica: antiinflammatorisk, druvkärnlja: antioxidant, hemisqualane: förbättrar hudbarriären.

STEG 16

Ta bort masken - börja från pannan och skala av nedåt.

STEG 17

Rengör hals och dekolletage

- INFO: Med varm handduk.

STEG 18

Applicera kroppslotion på hals och dekolletage

- PRODUKT: Prebiotic Moisturizing Body Lotion.
- INFO: Applicera med händerna.
- DETALJER: Långvarig återfuktning och hälsosam lyster.

NANNIC

Upptäck din bästa hud någonsin.

STEG 19

Avsluta med Pore treat lotion för att ta bort rester av masken

- **PRODUKT:** Pore Treat Lotion.
- **INFO:** Använd bomullsrondeller.

STEG 20

Applicera Hyaluron & Agave Toner över hela ansiktet

- **PRODUKT:** Hyaluron & Agave Toner.
- **INFO:** Applicera med händerna (morgonrutin).
- **DETALJER:** Provitamin A, B1, B2, K, D och C ger hälsosam lyster och jämnar ut huden.

STEG 21 a

Applicera Vitamin D-serum över hela ansiktet

- **PRODUKT:** Vitamin D booster.
- **INFO:** Applicera med händerna (morgonrutin).
- **DETALJER:** Ökar syntesen av vitamin D och neutraliserar UV-skador.

STEG 21 b

Applicera Stem Cell Recovery Serum över hela ansiktet

- **PRODUKT:** Stem Cell Recovery Serum.
- **INFO:** Applicera med händerna (kvällsrutin).
- **DETALJER:** Ökar syntesen av vitamin D-absorption och neutraliserar UV-skador.

STEG 22

Applicera Multi-layer Hyaluron Cream över hela ansiktet

- **PRODUKT:** Multi-layer Hyaluron Cream.
- **INFO:** Applicera med händerna.
- **DETALJER:** Djup återfuktning och ökar kollagenproduktionen.

STEG 23

Applicera UV-Shield

- **PRODUKT:** UV-Shield.
- **INFO:** Spraya på ansiktet.
- **DETALJER:** : Inkapslat solskydd mot UV-A och UV-B.

NANNIC

Upptäck din bästa hud någonsin.

STEG 24

Ge kunden råd och gå igenom hemmaprodukter

- **PRODUKT:** Stratum Symbiosum 6-veckorsbox.

STEG 25

Boka in ett nytt möte inom 6 veckor

STEG 26


**Desinficera och rengör din arbetsplats och enhet + byt ut plastskyddet, samt rengör och tor-
ka använda överdrag ordentligt**

- **PRODUKT:** Tool cleaner.

NANNIC

Upptäck din bästa hud någonsin.

5. PRODUKTINFORMATION

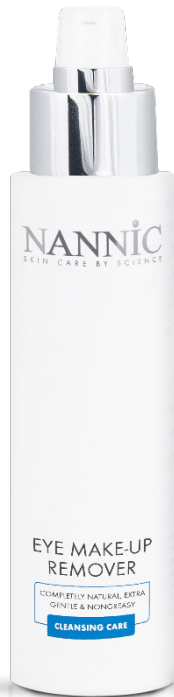


NANNIC EYE MAKE-UP REMOVER

- 100% naturlig ögonrengöring
- Icke-fet
- Ultramild
- Utan konserveringsmedel

KOKOSALKANER: En mycket fin flyktig olja som finns som en separat substans i kokosolja.

KOKOSKAPRYLAT: Ger en silkeslen känsla.

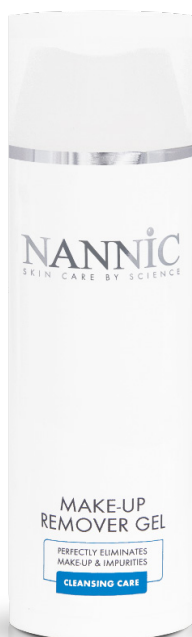

NANNIC MAKE-UP REMOVER GEL

- Skonsam mot hudens hydro-lipidfilm
- Sockerbaserad
- Gel som omvandlas till mjölk
- Skonsam rengöring, även om du inte använder smink

SHEASMÖR: Återfuktar, förbättrar blodcirkulationen och främjar hudens elasticitet.

RAPSOLJA: Rik på Vit. E-K. Mjukar upp rynkor, fina linjer och fläckar, och lämnar huden mjuk och strålande.

NANNIC

Upptäck din bästa hud någonsin.



NANNIC PORE CARE CLEANSER STRATUM SYMBIOSUM®

- Avlägsnar orenheter
- Förfinar porerna
- Fräschar upp och mjukar upp huden
- Hjälper till att upprätthålla ett hälsosamt mikrobiom

SMEKTISK LERA: Naturligt emulgeringsmedel med uppfriskande effekt och absorberar talg.

INULIN & FRUKTOS FRÅN CIKORIA: Fyller ut rynkor och har en lyftande effekt, mjukar upp huden och återställer mikrobiomet.



NANNIC WILLOW BARK PEELING MASK

- Mild keratolytisk peeling med naturlig salicylsyra
- Avlägsnar döda hudceller
- Lämnar huden slät och strålande
- Minskar och förebygger hudinflammation

SALIX ALBA-EXTRAKT: Naturlig salicylsyra som utvinns ur pilträdets bark.

ALOE VERA (BARBADENSISBLAD): Lugnar och förebygger hudirritation, antibakteriell.

KAMOMILL: Anti-inflammatorisk.

JOJOBAOLJA: Naturlig antioxidant.

NANNIC

Upptäck din bästa hud någonsin.



NANNIC PORE TREAT LOTION

- Respekterar hudens naturliga pH och biologiska barriär
- Reglerar fuktbalansen och normaliserar talgproduktionen
- Förebygger och återställer hyperpigmentering

TROLLHASSELEXTRAKT: Lugnande, antiinflammatorisk.

VITAMIN B5: Regenererar, återfuktar.

ALLANTOIN: Stimulerar nybildning av celler och lämnar huden mjuk och slät.



NANNIC PREBIOTIC AGAVE TONER STRATUM SYMBIOSUM®

- Prè-serum
- Stimulerar den naturliga produktionen av hyaluronsyra
- Lämnar huden mjuk och slät
- Lindrar akne, mörka fläckar och kommedoner

WITCH HAZEL-EXTRAKT: Minskar rodnad och porstorlek, reducerar svullnad och har en antiinflammatorisk effekt.

NATRIUMHYALURONAT: Återfuktar, mjukar upp hornlagret, bildar en skyddande film på huden och stöder mikrobiomet.

NECTAR FRÅN AGAVE TEQUILANA PLANTAN: Innehåller provitamin A, B1, B2, K, D och C. Minskar rynkor. Har en lyftande effekt på huden.

NANNIC

Upptäck din bästa hud någonsin.




NANNIC PREBIOTIC VITAMIN D SERUM STRATUM SYMBIOSUM®

- Förbättrar hypersensitiv, reaktiv, irriterad och intolerant hud
- Stärker syntesen av vitamin D
- Volymfyllande effekt

STAMCELLER FRÅN DAUCUS CAROTA SATIVA: Skyddar mot oxidativ stress, minskar inflammation, skyddar mot rodnad och läker erytem snabbt.

STAMCELLER FRÅN NEKTAR AV LITHOPS (LEVANDE STENAR): Stärker syntesen av vitamin D, ger vacker hudton, filler-effekt, naturligt skydd mot UV och förbättrar hudens återfuktning.

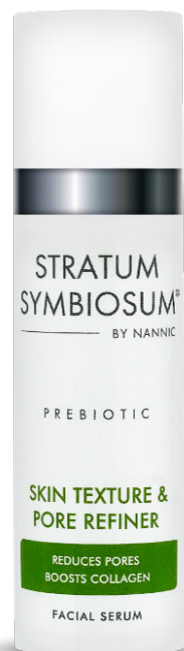

NANNIC PREBIOTIC PORE REFINER SERUM STRATUM SYMBIOSUM®

- Förfinar porerna synbart
- Stimulerar produktionen av flera typer av kollagen
- Hjälper till att reducera rynkor
- Minskar hyperpigmentering

BLANDNING AV NATRIUMMANNOS, MANNOS, LYSIN, MJÖLKSyra, PROLIN OCH KOPPARSULFAT: Stimulerar produktionen av flera kollagener, stärker dermis, minskar porer.

SODIUM RETINOYL HYALURONATE: Starkt anti-aging, rynkminskning, minskar akne och rodnad.

NANNIC

Upptäck din bästa hud någonsin.




NANNIC PREBIOTIC STEM CELL RECOVERY SERUM STRATUM SYMBIOSUM®

- Motverkar cellåldrande
- Stramar upp och reparerar huden
- Förebygger svullnad och slapp hud
- Främjar vacker åldrandeprocess

FYTOPEPTID FRÅN ASIATISK VATTENNAVELÖRT (GOTU KOLA): Har en uppstramande, konturförbättrande och anti-rynk-effekt. Förhindrar cellåldrande.

OLIVOLJA: Ökar cellenergin, minskar rynkor, förebygger svullnad, återställer stress efter rakning.

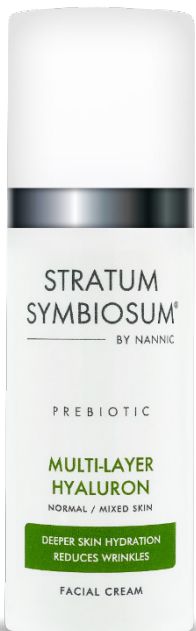

NANNIC PREBIOTIC MULTI-LAYER HYALURON CREAM STRATUM SYMBIOSUM®

- Ger djupgående återfuktning
- Reducerar fina linjer och rynkor
- Ökar kollagenproduktionen
- Förhindrar glänsande hud

ARIZONA SMEKTISK LERA: Uppfriskande och absorberar talg.

HYALURONSYRA 1300-2300 KDA: Ger omedelbar återfuktning av hornlagret och minskar fina linjer.

HYALURONSYRA 150-1300 KDA: Förbättrar aktivt hudbarriären och stödjer hudens naturliga mikrobiom.

HYALURONSYRA & RETINOID 10-150 KDA: Minskar rynkor och har en mycket positiv effekt på akne. Stimulerar produktionen av kollagen och fibronectin.

NANNIC

Upptäck din bästa hud någonsin.



NANNIC PREBIOTIC MOISTURIZING BODY LOTION STRATUM SYMBIOSUM®

- Kraftfull näring för huden
- Absorberas snabbt och lämnar inga klabbiga rester
- Återställer hudbarriären
- Lämplig för alla hudtyper, även den mest känsliga

SHEASMÖR: Rik på Vit. E och A, återfuktande och antiinflammatorisk.

MAJSSTÄRKELSE: Rik på Vit. A, B och C, minskar klåda och rodnad.

OLIVSMÖR: Mjukgör, lugnar och förhindrar TEWL (transepidermal vattenförlust).



NANNIC NBE LIFTING

- Fungerar som ett icke-kirurgisk ansiktslyft genom att stimulera tillväxten av nytt kollagen och elastin
- Minskar rynkor
- Stimulerar återförening av huden till muskelsystemet

FOSFATIDYLKOLIN: Förbättrar överföringen av de aktiva ingredienserna.

GLYKOSAMINOGLYKANER: Anti-rynk-effekt, korregerar fuktbalansen, ger fasthet genom bättre kollagensyntes.

ALGEXTRAKT: Anti-aging, stramar upp huden, dränerar cellulärt avfall, minskar inflammatorisk rodnad.

BLOMEXTRAKT: Skyddar fibroblasttillväxtfaktorn B, anti-rynk-effekt, ökad syntes av kollagen, elastin och endogena ämnen.

ORGANISKT KISEL (CHLORELLA): Stramar upp huden, förebygger och reducerar bristningar och ärr, förbättrar cellkommunikation.

CANNABIS SATIVA-FRÖOLJA: Förbättrar hudbarriärfunktionen och ökar fuktbevaringen.

NANNIC

Upptäck din bästa hud någonsin.



NANNIC NBE REDNESS (COUPEROSE)

- Skyddar det extracellulära matrixet
- Stärker nätverket runt kärlväggarna
- Förbättrar syreupptaget genom kapillärerna
- Dränerar vätska

FOSFATIDYLKOLIN: Förbättrar överföringen av de aktiva ingredienserna.

GLYKOSAMINOGLYKANER: Minskar rosacea, telangiektasier, blåmärken, återställer fuktbalansen och reducerar mörka ringar runt ögonen..

KRYSANTEMUM: Stark antioxidant – antiinflammatorisk, minskar rosacea, akne och rodnad.

HIBISCUS ABELMOCHUS: Anti-rynk-effekt, ökad syntes av kollagen och elastin.

CANNABIS SATIVA-FRÖOLJA: : Förbättrar hudbarriärfunktionen och ökar fuktbevaringen.

Används för: Rosacea, rodnad, mörka ringar, svullnad.



NANNIC NBE FLACCID SKIN

- Stramar upp huden genom att stimulera cellförnyelse
- Stimulerar bildandet av kollagen och elastin
- Förbättrar fuktbalansen
- Är en stark antioxidant

FOSFATIDYLKOLIN: Förbättrar överföringen av de aktiva ingredienserna.

KARCININ: Återställer cellmembranet och är en stark antioxidant som riktar sig mot både hydrofila och lipofila mål, förhindrar glykering.

SOJAISOFLAVON: Lyftande effekt, stimulerar kollagenet, stramar upp huden.

ORGANISKT KISEL FRÅN SÖTVATTENSALGER: Har en uppstramande effekt och är urindrivande.

Används för: Slapp hud.

NANNIC

Upptäck din bästa hud någonsin.



NANNIC NBE STRIAE

- Ökar produktionen av kollagen i huden
- Förbättrar elasticiteten
- Förbättrar bindväven
- Stimulerar ärrläkning
- Fungerar bra mot djupa rynkor (kan även användas förebyggande)

FOSFATIDYLKOLIN: Förbättrar överföringen av de aktiva ingredienserna.

ORGANISKT KISEL FRÅN SÖTVATTENSALGER: Återställer bindväven (elastin & kollagen), förhindrar ärrbildning, reparerar befintliga ärr, stramar upp huden, fungerar som en antioxidant.

CANNABIS SATIVUM-FRÖOLJA: Essentiell olja rik på fleromättade fettsyror, gör huden mjuk och smidig och förbättrar cellfunktionerna.

Används för: Bristningar på kroppen, ärr i ansiktet och djupa rynkor.



NANNIC NBE IMPURE SKIN

- Reglerar talgproduktionen
- Regör porerna på djupet
- Motverkar bildning av ärrvävnad
- Verkar naturligt antibakteriellt

FOSFATIDYLKOLIN: Förbättrar överföringen av de aktiva ingredienserna.

ORGANISKT KISEL FRÅN SÖTVATTENSALGER: Reparerar bindväven (elastin & kollagen), förhindrar ärrbildning, läker befintliga ärr.

LAVENDELEXTRAKT: Naturligt antibakteriellt.

HUMLEEXTRAKT: Fytohormonaktivitet, reglerar talgproduktionen.

RÖD SÅPNEJLIKAEXTRAKT: Rengör skonsamt på djupet i porerna.

HAVSELASTIN: Motverkar bildandet av permanent ärrvävnad.

Används för: Aknehud, manlig hud, irriterad och stressad hud, minskning av ärrvävnad.

NANNIC

Upptäck din bästa hud någonsin.



NANNIC NBE HYPERPIGMENTATION

- Hämmar signalen som aktiverar melanocyterna
- Minskar tyrosinasaktiviteten i cellen (enzym som kan leda till bildandet av mörkt pigment)
- Hämmar distributionen av melanosomer till keratinocyterna
- Har en stark reducerande effekt på fria radikaler
- Normaliserar åldersfläckar, postinflammatorisk hyperpigmentering och melasma


FOSFATIDYLKOLIN: Förbättrar överföringen av de aktiva ingredienserna.

CANNABIS SATIVUM-FRÖOLJA: Eterisk olja, rik på fleromättade fettsyror, gör huden mjuk och smidig och förbättrar cellfunktionerna.

NONAPEPTID-1: Minskar pigmentbildningen i melanocyterna.

KRASSE: Skyddar huden, fungerar som en antioxidant och förhindrar fördelning av överskottspigment (fagocytos).

Används för: Åldersfläckar, fräknar, pigmentfläckar, melasma.

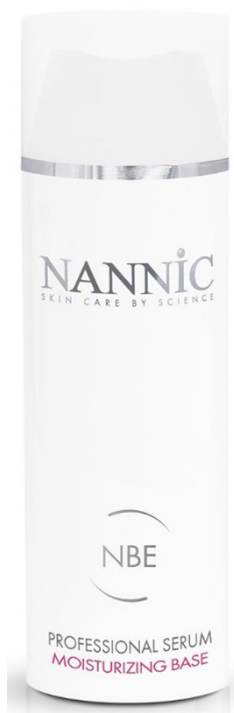

NANNIC NBE BASE

- Lamellär bas utan ytterligare aktiva substanser
- Mycket återfuktande

FOSFATIDYLKOLIN: Förbättrar överföringen av de aktiva ingredienserna.

GLYKOSAMINOGLYKANER: Minskar rosacea, telangiektasier, blåmärken och återställer fuktbalansen.

CANNABIS SATIVA-FRÖOLJA: Förbättrar hudbarriärfunktionen och ökar fuktbevaringen.

SKVALAN: Hudens egen mjukgörare.

CERAMID 111: Förbättrar hudbarriären.

Används som stöd vid behov av mer serum, på till exempel en extra torr hud.

NANNIC

Upptäck din bästa hud någonsin.

NANNIC PEEL OFF ALGAE MASKS

En avslutande "peel-off"-algmask baserad på alginat och berikad med aktiva substanser. De aktiva ingredienserna i maskerna stänger porerna, fräschar upp huden och ger kunden en övergripande känsla av lugn och avslappning. De är naturligt bio-organiska och innehåller inga konserveringsmedel. Det finns olika masker, var och en med sina egna effekter.



PEEL OFF ALGAE MASK ULTRA MOISTURIZING

- Återställer snabbt och effektivt hudens fuktbalans
- Är en antioxidant
- Gör huden slät
- Lämnar huden med en silkeslen känsla

ALOE VERA: Lugnar och mjukar upp huden. Fuktreglerande effekt.

KALCIUMSULFAT: Återställer hudbarriären, ger näring och mjukgör huden.

XANTANGUMMI: Återställer hudens fuktbalans. Förhindrar TEWL (transepidermal vattenförlust) och är effektivt mot åldrande.

(500 gr – refillförpackning)

PEEL OFF ALGENMASKER PURIFYING MED BIXA ORELLANA

- Avlägsnar orenheter
- Förfinar porerna
- Reglerar talgproduktionen

BIXA ORELLANA: Reglerar talg, avlägsnar orenheter och förfinar porerna.

MALTODEXTRIN: Mjukar upp huden och har en återfuktande och utfyllande effekt. Har också en mattifierande effekt.

KALCIUMSULFAT: Återställer hudbarriären, hudbarriären, ger näring mjukgör huden.

XANTANGUMMI: Återställer hudens fuktbalans. Förhindrar TEWL (transepidermal vattenförlust) och är effektivt mot åldrande.

(500 gr - refillförpackning)



NANNIC

Upptäck din bästa hud någonsin.



NANNIC BIO-ENERGY MASSAGE GEL

- Utmärkta spridningsegenskaper
- Lämnar huden smidig och mjuk
- Har en stark antioxidant effekt
- Skyddar mot yttre stressfaktorer
- Är inte fet vid beröring
- Fläckar inte kläder eller handdukar
- Innehåller inga parabener eller formaldehyd

OPUNTIA INDICA-EXTRAKT: Ger intensiv återfuktning, har en lugnande effekt och bildar ett skyddande lager på huden.



HEPTA-PEPTIDMASSAGEGEL WITH ARNICA

- Oändlig spridbarhet
- Lämnar huden mjuk och smidig
- Stärker hudbarriären
- Gör huden mjukare
- Främjar hudens förnyelse

ARNIKAOLJA: Antiinflammatorisk, skyddar torr och känslig hud och stimulerar hudregeneration.

VINDRUVSKÄRNOLJA: Rik på antioxidanter, återfuktar huden och stimulerar produktionen av elastin och kollagen.

HEMISQUALANE: Förbättrar hudbarriärens integritet, ökar celltillväxt och minskar rynkor och fina linjer.

NANNIC

Upptäck din bästa hud någonsin.



NBE PROBIOTIC ACTIVATOR

- Förbättrar energiöverföringen av NBE-serumen
- Förlänger behandlingens glidande effekt

NATURAL BIFIDA LYSATE: Förbättrar barriärfunktionen, stöder immunsystemet.

För alla hudtyper.



UV-SHIELD

- Skyddar mot UV-A, UV-B, blått ljus
- Anti-age produkt

INKAPSLADE SOLFILTER: Solfiltren är inkapslade i kiseldioxid så att de inte kan tränga in i huden och blodomloppet.

RED ALGAE EXTRACT: Återfuktande, antioxidant, antibakteriell.

För alla hudtyper, även de mest känsliga.

6. KUNDJOURNAL

Placera din logotyp här

Vi ber dig vänligen att fylla i detta frågeformulär. Dina uppgifter lagras säkert och används endast för att skapa den bästa behandlingen för dig. Du kan begära att få dina uppgifter raderade när som helst. Om du inte har besökt salongen på mer än ett år kommer vi automatiskt att radera dina uppgifter.

1. Personlig information

Namn:

Gatunamn:

Postnummer:

Stad:

Födelsedatum:

Telefonnummer:

Får vi kontakta dig på (e-postadress).....

För att hålla dig informerad om de senaste nyheterna OCH/ELLER erbjudanden?

2. Medicinska uppgifter

Får du behandling av en vårdpersonal? JA/NEJ

Använder du medicin? JA/NEJ

Om ja, vänligen ange vilken medicin du använder:

.....

Är du allergisk mot vissa kosmetika/ingredienser? JA/NEJ

Om ja, vilka?

.....

Har du matallergier och/eller intoleranser? JA/NEJ

Om ja, vilka?

.....

Ange vad som är tillämpligt:

Hjärtproblem JA/NEJ

Pacemaker JA/NEJ

Diabetes JA/NEJ

Graviditet JA/NEJ

Epilepsi JA/NEJ

Blodtryck HÖGT/NORMALT/LÅGT

Kontaktlinser JA/NEJ

Botox/fillers JA/NEJ

NANNIC

Upptäck din bästa hud någonsin.

5. Livsstil

Röker du? JA/NEJ

Hur mycket alkohol dricker du per vecka?

Använder du solarium? JA/NEJ

Känner du dig stressad? JA/NEJ

6. Förväntningar

Vad förväntar du dig av din hudspecialist och behandlingarna?

.....

.....

.....

.....

Vilket område är i störst behov av behandling?

. Panna

. Näsa/nasolabialveck

. Överläpp/mun

. Käklinje

. Ögon

. Dekolletage

NANNIC

Upptäck din bästa hud någonsin.

7. Övriga frågor

Tycker du om att få massage? JA/NEJ

Under behandlingen, föredrar du att prata MYCKET/INTE ALLS/LITE?

Preferens för musik: AVKOPPLANDE/RADIO/ANNAT, nämligen.....

Vi tar bilder för att dokumentera framstegen i behandlingen.

Kan vi dela dessa på sociala medier? JA/NEJ

IGENKÄNNBAR/OIGENKÄNNBAR

Ska fyllas i av behandlande hudspecialist:

Hudanalys:

Kommentarer:

Datum:

Underskrift:

Uppgifterna ovan kan även anges på ett separat formulär eller direkt i din dator.

NANNIC

Upptäck din bästa hud någonsin.

ANTECKNINGAR

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Upptäck din bästa hud någonsin.

NANNIC

Upptäck din bästa hud någonsin.

ANTECKNINGAR

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....