

NANNIC

NY NBE 3000 UPPREGLERAD MED LAGSTIFTNING 2024
Så här aktiverar du enheten



Anslut strömförsörjningskabeln
till enhetens baksida.



Koppla in säkerhetsbrytaren


(detta är nytt jämfört med tidigare
enheter.)
!! NBE 3000-enheten startar inte om
säkerhetsbrytaren inte är inkopplad.




Anslut sedan de aktiva sonderna
(eller aktiva plattorna) + de
inaktiva plattorna.



Slå på enheten,
tryck på den gröna på/av-
knappen.

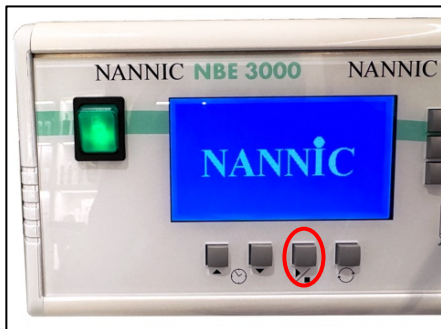


Nannics logotyp kommer att visas
i
skärmen.
Tryck på den tredje knappen för
att starta.

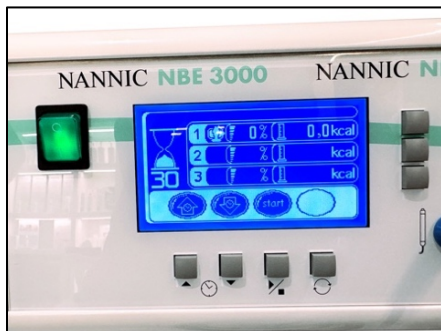

Du kommer nu att få upp skärmen
Du kan se det på bilden.



Tryck på för att bekräfta starten.

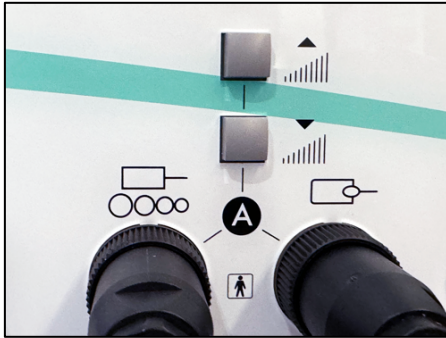

Med dessa knappar kan du justera intensiteten.



NBE-enheten körs nu. I det här exemplet har intensiteten justerats till 44%. I den högra kolumnen ökar den absorberade energin i kcal.



För att stoppa eller pausa, tryck på knappen 3 igen.



Tryck på knappen 4th för att tömma kretsen. Intensitet och Kcal återgår till 0. Enheten kan nu vara avstängd eller återställd.