

NANNIC

NEW NBE 3000 - AANGEPAST AAN DE WETGEVING 2024
In werking stellen van het apparaat



Sluit de stroomkabel aan
op de achterzijde van het
apparaat.



Connecteer eerst de
veiligheidsknop.


Dit is nieuw vergeleken met vroegere
NBE 3000 toestellen. !! Het apparaat zal
niet starten als de veiligheidsknop niet is
aangesloten.




Sluit nu de handstukken (of
actieve platen) + de inactieve
platen aan.



Zet het toestel aan,
druk op de groene aan/uit-knop

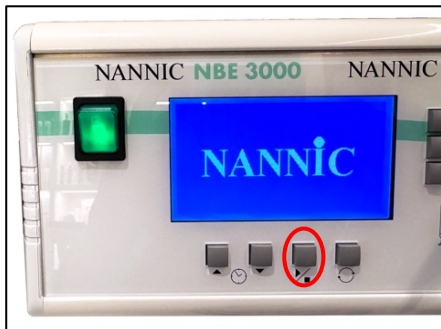


Het Nannic logo verschijnt op het
scherm.
Druk nu op de derde knop om de
behandeling in te stellen.

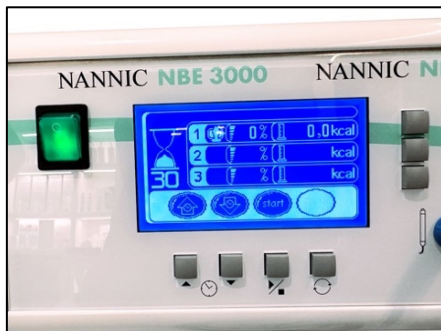


Volgend scherm wordt nu
weergegeven



Druk opnieuw op de 3de knop om
de start te bevestigen.

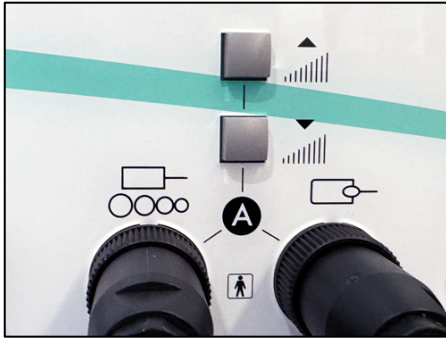

Met deze knoppen pas je de intensiteit aan.

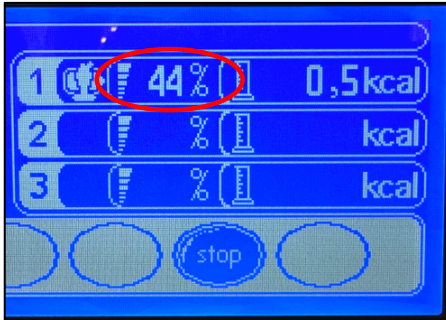

Het NBE toestel is nu in werking. Bij dit voorbeeld werd de intensiteit ingesteld op 44%. Het rechter vak geeft de geabsorbeerde energie weer in Kcal dat verder zal oplopen.



Om te stoppen of te pauzeren druk opnieuw op de derde knop



Druk op de 4e knop om het circuit leeg te maken. Intensiteit en Kcal gaan terug naar 0. Het apparaat kan nu worden uitgeschakeld of gereset.