

PRODUKTPROTOKOLL: UPPSTRAMNING OCH LYFT AV ARMARNA


Behandlingstid: ca 45 min.

Steg 1 - Automatiskt lymfdränage med plattor

1. Kunden ligger på rygg - rengör armarna med en ljummet fuktig trasa.
2. Fäst 1 aktiv platta på varje överarm där huden är slapp. OBS: med den aktiva sidan (orange cirklar) placerad mot huden.
3. Fäst med elastiska band.
: att plattan har lika stor kontakt med överallt.
4. Placera 2 inaktiva plattor i höjd med skulderbladen.
FÖRSIKTIGHET: Se alltid till att ha god kontakt med huden.
5. Slå enheten.
6. Ställ in intensiteten på 35% och ställ in timern på 10 min.
7. Fråga alltid kunden om temperaturen är rätt. För varmt är inte ett plus.
8. Låt den i 10 minuter.

**Aktiv platta:** Alltid i gelhölje FÖRSIKTIGHET
Kontrollera alltid gelhöljet med avseende på sprickor eller hål. Utflytande gel kan orsaka brännskador.

**Inaktiv platta:**
FÖRSIKTIGHET: Lägg ALDRIG den inaktiva plattan i en gelväska

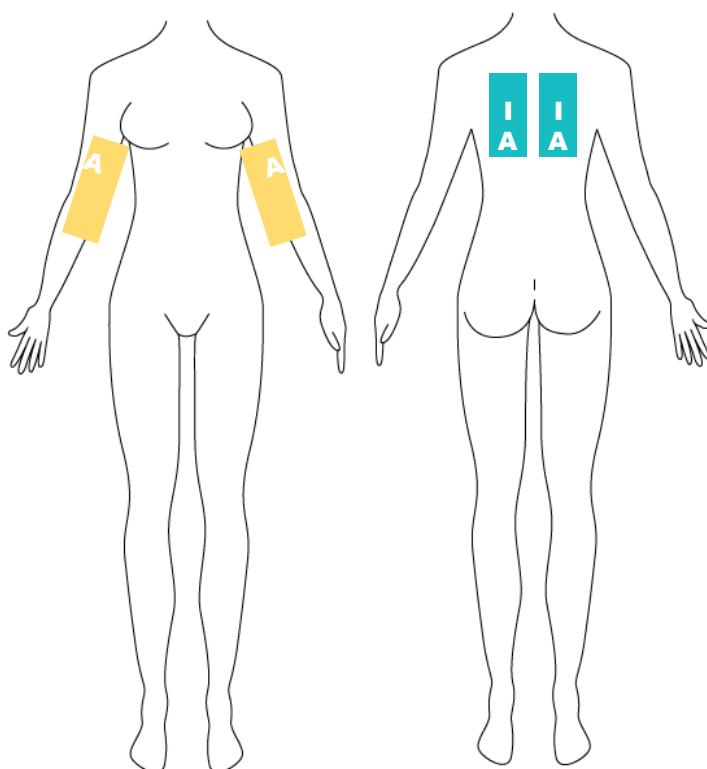

PRODUKTPROTOKOLL: UPPSTRAMNING OCH LYFT AV ARMARNA

Steg 2 - Manuell behandling med monopolärt handstycke

(Klienten ligger kvar i rygläge)

1. Låt de inaktiva plattorna ligga kvar mellan skulderbladen
2. Koppla bort de 2 aktiva plattorna och ersätt dem med 2 monopolära prober
3. Ställ in intensiteten till 30%.
4. Fördela serumen FLACCID, FAT REDUCTION, CELLULITE, STRIAE och BASE på det område som ska behandlas
5. Tillsätt några droppar PROBIOTIC ACTIVATOR
6. Följ behandlingsritualen enligt beskrivningen i foldern, +/- 15 minuter per arm
7. Ställ in enheten på stopp, rensa portarna och ta bort de aktiva plattorna.
8. Rengör huden med en ljummen och fuktig trasa.
9. Avsluta behandlingen med Nannic Slim & Firm och rekommendera denna produkt för vidare användning hemma.

