

NANNIC

Behandlingsprotokoll

Hudförbättring ansiktsbehandling: akne

renar och avgiftar | återställer och stärker | balanserar mikrobiomet

NBE 3000 Radiofrekvens

Tid: 70 minuter.

Rekommenderas för: Acne och förstörade porer.

Antal behandlingar

- **Behandlingstillfällen:** 6 till 8 Första 2 veckorna: 2x per vecka; därefter 1x per vecka
- **Underhåll:** 1x var 4:e veckan till 6:

Produktrådgivning för hemmet

- **Rengöring:** Eye Make-up Remover, Pure Active Cleansing, Prebiotic Pore Care Cleanser, Pore Treat Lotion, make-up remover gel
- **Mask:** Willow Bark Peeling Mask, Probiotic Recovering & Calming
- **Vårdande:** Prebiotic Hyaluron & Agave Toner, Prebiotic Pore Refiner Serum, Prebiotic Vitamin D Serum, Multi-Layer Hyaluron Cream
- **Skyddar:** UV-shield, Intense Lip Repair



NANNIC

Förbereda

NBE 3000 Radiofrekvens

NBE Detox

10 minuter

Fäst 3 elektroder plattor med på inaktiva benen: 2 på vänster ben och 1 på höger. Applicera sedan 3 aktiva plattor: 1 på nedre delen av ryggen (njurarna), 1 på övre av ryggen delen() avslappningskotorna och 1 på bröstet (under). nyckelbenet Sätt på apparaten. Starta på 100 %. Se till att den förblir behagligt varm. Sänk om det behövs.

Rengöring

Ta bort ögonmakeup

1x Avlägsnande av ögonsmink

2 minuter

Ta bort ögonmakeup med Eye Make-up Remover på en bomullsrandell.

Förrengöringsmedel

1x Make-up Remover Gel

2 minuter

Applicera Make-up Remover Gel och massera med lätt fuktade in tillen emulsion. Torka av med en ljummet fuktig trasa.



NANNIC

Rengöring

1x Prebiotic Pore Care Cleanser

5 minuter

Klappa huden torr. Applicera rengöringsmedlet jämnt på ansikte och hals/decolleté. Låt verka i 1 minut. Massera sedan med fuktiga händer. Torka av med en ljummet fuktig trasa.

Keratolytisk peeling

Willow Bark Peeling Mask

10 minuter

Applicera masken jämnt på ansikte och hals/decolleté med hjälp av borsten. Låt verka i 5 minuter. Massera sedan med fuktiga händer. Avlägsna med en ljummet fuktig trasa.

Behandla

NBE 3000 Radiofrekvens

1x NBE Impure Skin

1x NBE Redness

1x NBE-base

1x NBE Probiotic Activator

20 minuter

Stäng enheten. Flytta den aktiva från bröstet till buken (större lymfkörtel). Ta bort 2 aktiva plattorna från baksidan och ersätt dem med 2 behandlingshuvuden. Applicera serum på behandlingsområdet. Sätt på apparaten igen och börja med låg intensitet (35 %). Börja att öppna lymfkärlen (terminus). Behandla problemområdena med cirkulära rörelser och dränera väl däremellan. Börja vid halsen/decolletaget och arbeta dig vidare mot ansiktet.



NANNIC

Mask

**Algae Mask Purifying
Pore Treat Lotion**

10 minuter

Fördela masken med hjälp av spateln över ansikte och hals/decolleté.
Låt verka i 10 minuter*. Ta av och avlägsna rester med Pore Treat Lotion.

Nära

Produkter för hemmet

Rekommendera produkter för hemmet och .tillämpa dem för stängning

Råd för acnehud:

1x Prebiotic Hyaluron & Agave Toner
Prebiotic Pore Refiner Serum
Vitamin D-serum

1x
1x Prebiotic

1x Prebiotic Multi-Layer Hyaluronic Cream D/S eller N/M
UV-Shield

* Kan kompletteras med en massage av nacke, axlar och dekolletage med Bio-Energy Massage Cream.
Avsluta massagen med Prebiotic Moisturising Body Lotion.

1x= 1 dos= 1 pump

