


PRODUKTPROTOKOLL: BEN

Behandlingstid: ca 45 min.


alternativ 1 - Dränering genom fotsulorna

1. Klienten i magläge - rengör benen med en ljummet fuktig trasa.
2. Fäst 1 aktiv platta i en gelhylsa på varje fotsula.
OBS: placeras med den aktiva sidan (orange cirklar) mot huden.
3. Fäst med elastiska band. FÖRSIKTIGHET: Se alltid till att ha god kontakt med huden.
4. Fäst 2 inaktiva plattor i höjd med njurarna. Fäst även dessa med de elastiska banden (2 per platta) och se till att de har god kontakt med huden.
5. Placera 1 inaktiv platta på buken. Fäst med de elastiska remmarna.
6. 1 monopolärt handstycke.
7. Slå på och ställ in intensiteten på 75%.
8. Applicera serumen CELLULITE, FLACCID, LIFTING, FAT REDUCTION, STRIAE och BASE på det område som ska behandlas. några droppar PROBIOTIC ACTIVATOR.
9. Arbeta i ca 15 min per ben medan det automatiska lymfdränaget är igång och följ behandlingsritualen som beskrivs i träningsmappen.

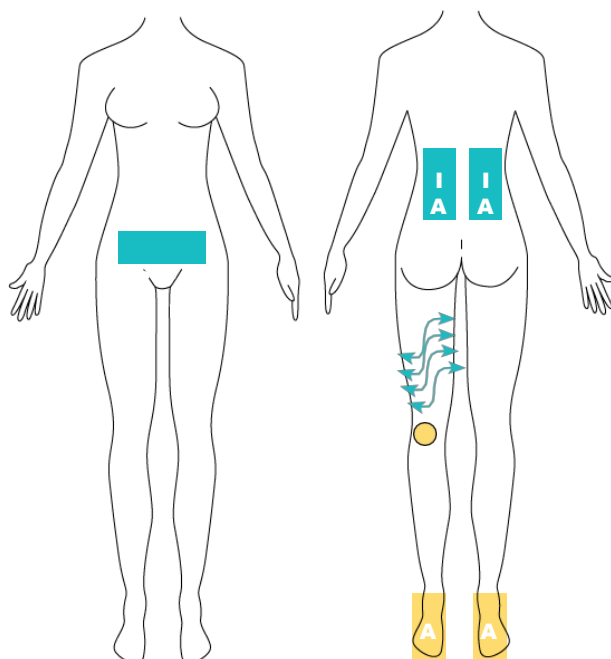

A Aktiv platta: Alltid i gelhölje FÖRSIKTIGHET
Kontrollera alltid gelhöljet med avseende på sprickor eller hål. Utflytande gel kan orsaka brännskador.

A Inaktiv platta:
FÖRSIKTIGHET: Lägg ALDRIG den inaktiva plattan i en gelväska

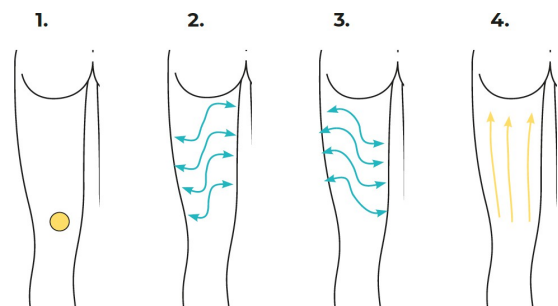

PRODUKTPROTOKOLL: BEN

Alternativ 2 - Aktiva plattor på knävecket, automatiskt lymfdränage

1. Fäst 2 aktiva plattor (med gelskydd) poplitealt (knähålan).
Fäst båda plattelektrodena ordentligt med de elastiska banden och se till att de alltid har god hudkontakt.
2. Fäst 2 inaktiva plattor i höjd med njurarna, säkra med elastiska band och se till att de har god kontakt med huden.
3. Placera 1 inaktiv platta under buken.
Se till att plattelektroden får god kontakt med huden.
4. 1 monopolärt handstycke till samma port.
5. Ställ in de aktiva plattorna på 50% intensitet och ställ in det manuella handstycket på 35%.
6. Arbeta ca 15' per ben medan det automatiska lymfdränaget är igång och följ behandlingsritualen enligt nedan:
7. Ställ in apparaten på stopp och töm - Torka av produkten med en ljummen trasa.

- DESSA OPERATIONER KAN OCKSÅ UTFÖRAS PÅ UNDERBENET -

