

NANNIC

upptäck din bästa hud (för)någonsin

PRODUKTPROTOKOLL: SKINKOR

Behandlingstid: ca 45 min.

Automatiska plattor co-planar - handstycke transdermal.

1. Klienten ligger i magläge.
2. Fäst 2 aktiva plattor strax under skinkans veck. Säkra med elastiska band.
3. Placera 2 inaktiva plattor i höjd med njurarna. Fäst med elastiska band.
4. Placera 1 inaktiv platta på buken i höjd med cisterna.
5. Anslut 1 handstycke till samma port som den inaktiva plattan på buken.
6. På glutei (sittytan) appliceras serumen FLACCID, FAT REDUCTION, CELLULITE, STRIAE, LIFTING och BASE med några droppar PROBIOTIC ACTIVATOR.
7. Sätt på med intensitet 45-50% och ställ in i 20-25 min (aktiva plattor).
8. Ställ sedan in intensiteten för handstycket på 35 till 45 %.
9. Använd handstycket för att lyfta från skinkans veck uppåt med tryck och nedåt utan tryck. (Cirka 15')
10. plattorna efter 10' om det behövs:
 - Placera aktiva plattor på insidan av låret
 - Placera inaktiva plattor på ytterlåret(Upprepa apparatinställningarna enligt ovan och fortsätt att arbeta med skinkorna i ca 10')
11. Sätt apparaten i stoppläge, töm portarna och ta bort plattorna.
12. Rengör huden med en ljummen, fuktig trasa Slim&firm och rekommendera denna produkt för vidare användning i hemmet.


	Aktiv platta: STEEDS i gelhölje FÖRSIKTIGHET: Kontrollera <u>alltid</u> gelhöljet med avseende på sprickor eller hål. Utflytande gel kan orsaka brännskador.
	Inaktiv platta: FÖRSIKTIGHET: Lägg ALDRIG den inaktiva plattan i en gelväska

NANNIC

upptäck din bästa hud (för)någonsin

PRODUKTPROTOKOLL: SKINKOR

Automatiska plattor co-planar - handstycke transdermal.

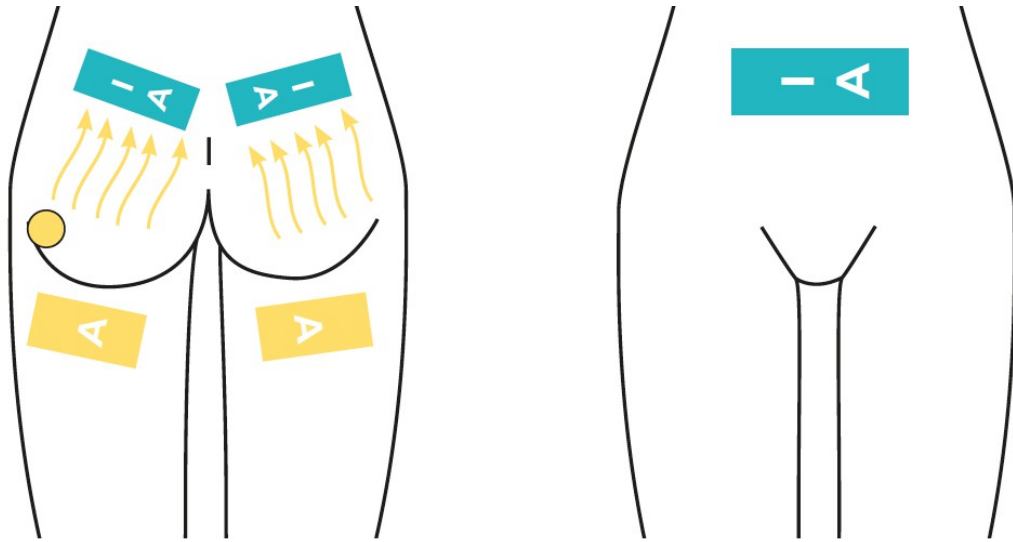

● Med tryck mot toppen och utan tryck mot botten

