

NANNIC

upptäck din bästa hud (för)någonsin

PRODUKTPROTOKOLL: RELAX

Behandlingstid: ca.min.

1. Förbered 2 elastiska band på behandlingsstolen thv buken, och 2 långa elastiska remmar i form av ett kors över bröstet.
2. Ta magen och lägg ut 2 inaktiva plattor, snyggt sida vid sida.
3. Låt patienten sitta i magläge och kontrollera att de inaktiva plattorna och remmarna fortfarande är väl placerade och har god kontakt med huden.
4. Ge kunden en säkerhetsknapp.
5. Placera 1 inaktiv platta på övre vänstra benet och fäst med elastiska remmar. **FÖRSIKTIGHET:** Kontrollera noga att hela plattan har god kontakt med huden!
6. Placera 1 aktiv platta horisontellt på skulderbladen, 1 aktiv platta horisontellt på njurarna och 1 aktiv platta vertikalt på ryggkotorna.
7. Fäst nu allt med de elastiska band som du redan har förberett och se till att alla plattor har en bra kontakt med huden, inklusive den under magen!
8. Slå på enheten och ställ in den på 100% (vita gelkuddar) eller 50% (svarta gelkuddar).
9. Låt apparaten gå i 10'. Efter 10' ställer du in apparaten på stopp och tömning.
10. Byt nu 2 aktiva plattor till 2 manuella behandlingshuvuden och ta även bort den 3:e aktiva plattan.
11. Ta bort den inaktiva plattan på benet och arbeta endast med de 2 inaktiva plattorna under buken och de 2 manuella behandlingshuvudena. Kontrollera att portarna är korrekt anslutna.
12. Rengör baksidan med en ljummet fuktig trasa.
13. Applicera nu NBE-serumen eller bara hepta peptide massage gel.
14. Följ massageritualen som visas på bilden för +/-15'
15. Ställ in enheten på stopp och .
16. Ta bort med en ljummen, fuktig trasa och avsluta med Prebiotic body lotion.

A

Aktiv platta: Alltid i gelhölje **FÖRSIKTIGHET**
Kontrollera alltid gelhöljet med avseende på sprickor eller hål. Utflytande gel kan orsaka brännskador.

I
A

Inaktiv platta:
FÖRSIKTIGHET: Lägg **ALDRIG** den inaktiva plattan i en gelväska

PRODUKTPROTOKOLL: RELAX

Relax HPA manual application

